

“女伴洁阴润洗器”

1 产品结构



科学合理的阴道冲洗，是妇产科临床医疗、预防和女性个人卫生护理的有效方法。

女性洁阴润洗器-阴道冲洗组合，注重产品安全性考量、方便有效卫生、轻巧便携，体现全新人性化设计理念，荣列上海市科研基金项目。

产品主体：

1. 阴道冲洗器，容积：125ml（具备防倒流功能）
2. 冲洗液，规格：5ml/袋（单剂量柔性袋装）

2 产品特点

2.1 洁阴润洗剂冲洗剂主要抗菌成分：醋酸氯己定

2.2

阴道冲洗器优点：

- 防止洗液倒流污染
- 不升高阴道压力
- 结构简洁操作方便
- 高效冲洗头冲洗可连续
- 抗菌塑料易保洁
- 一“盖”保护女隐私

柔性袋装单剂量冲洗液优点：

- 一剂一袋一个准
- 袋口入瓶不费心
- 储藏携带都方便
- 洁阴杀菌效果明

3 主要用途

有效杀菌抗感染，迅速杀灭大肠杆菌、金黄色葡萄球菌和白色念珠菌等致病菌；
月经后期祛除异味和过量分泌物；

- 妇产科治疗、辅助治疗所需的阴道冲洗、外阴清洁
- 手术、预防和护理所需的阴道冲洗、外阴清洁；
- 接触公共水体活动场所（如游泳池，浴场，水上游乐场）和接触其他公用卫生设施后，进行个人预防阴道冲洗。

4 临床观察

本产品已成功通过上海市第一妇婴保健医院，上海市仁济医院，上海市第一人民医院，上海市第九人民医院，上海市新华医院，上海市普陀区妇婴保健院等多家医院的临床观察，证明治疗炎症和配合手术的冲洗效果明显。

本产品弥补了传统阴道冲洗产品的多方面不足，有助于消除使用者重复感染和发生逆行性感染及盆腔炎的风险。

5 产品使用方法

取洗液一袋（或遵遗嘱），撕开突出端的缺口，将袋内洗液（内含 5ml）倒入冲洗瓶内，加净水（纯净水，蒸馏水，冷开水均可）稀释至 125ml---为一满瓶，旋上瓶盖/冲洗头。

拔出冲洗头，直到露出尾部小孔，并听到咔嚓声，表示冲洗头已正确定位；轻轻将冲洗头送入阴道内，挤捏瓶子，进行冲洗。冲洗液可以在阴道内适当保留数分钟。

适当的冲洗体位：仰卧位、后仰的坐位，也可采用站位蹲位冲洗，余下的冲洗液用于冲洗外阴。

注意事项

女性用品应个人专用，及时更新，不推荐启用后长期保藏。

配置冲洗液应一次性使用，避免洗液剩余污染。

6 产品注册信息

产品名称：女伴-洁阴润洗器（组合）

注册证号：沪食药监（准）字 2007 第 1660002 号

企业登记号：沪械企登 20030935

产品标准号：YZB/沪 2503-66A-2006 Q/SSIK 4-2006

产品名称：洁阴润洗剂

生产许可证号：沪卫消证字（2006）第 0030 号

产品标准号：Q/SSIK 3-2007

联系人：周经理

联系电话：021-65980513 18917694058

传真：021-65981974